


EP 3 SONIC DEFENDERS® & EP 4 SONIC DEFENDERS® Plus

Impuls-Gehörschutz, der das Ohr nicht verschließt.



- Intelligente Impulsschalldämmung
- Richtungshören bleibt erhalten
- Hoher Tragekomfort
- Integrierte Ohrbelüftung
- Hautfreundlich und antiallergisch
- In 3 Größen lieferbar (S – M – L)
- Ideal kombinierbar mit anderen Schutzausrüstungen (Helm, Brille, Atemschutz)

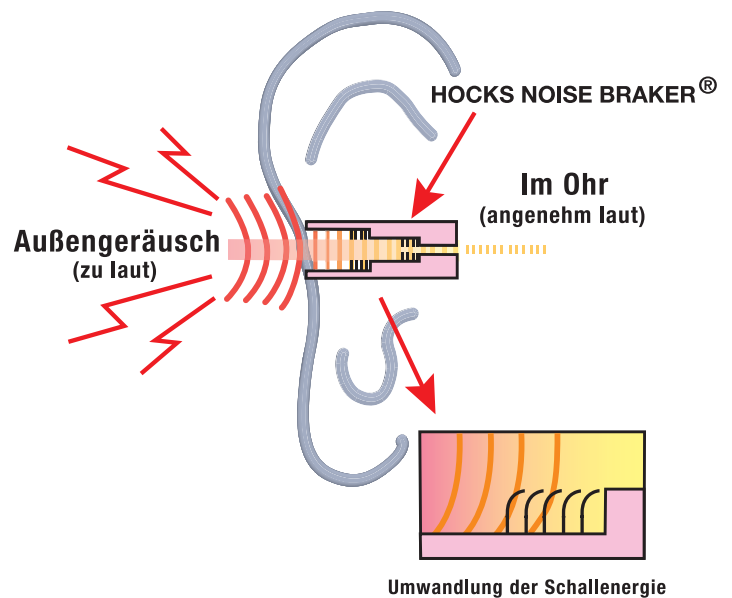



Produktinformation

EP3 SONIC DEFENDERS® & EP4 SONIC DEFENDERS® PLUS

Baumusterprüfung nach EN 352-2: 2002 / CE 160902-1 / CE 160903-1
(Hörschwellenprüfung mit Akustik-Stopper in Filter eingesetzt)

Die spezielle Filter-Architektur verschließt das Ohr nicht und bewirkt eine pegelabhängige Impulsschall-Dämmung. Gefahrlose Umgebungsgeräusche und Gespräche können mit den Sonic Defenders® nahezu unverfälscht und ohne Verschluss-Effekt wahrgenommen werden. Die Sonic Defenders® sind im 2-Lamellen-Design (EP3) und im 3-Lamellen-Design (EP4) lieferbar.



SONIC DEFENDERS® EP3

Gehörschutz im 2-Lamellen-Design, verfügbar in den Größen S - M und L. Die verschiedenen Größen beziehen sich auf den Stützbogen, der in der Ohrmuschel bequemen Halt bietet (siehe Anpasshilfe).




SONIC DEFENDERS® PLUS EP4

Gehörschutz im 3-Lamellen-Design, verfügbar in den Größen M und L. Die verschiedenen Größen beziehen sich auf den Stützbogen, der in der Ohrmuschel bequemen Halt bietet (siehe Anpasshilfe).

Das patentierte Filtersystem

bewirkt ein einzigartiges Akustik-Design mit einer flachen und nahezu resonanzfreien Dämmung für außergewöhnlichen Hörcomfort in lauter Umgebung. Das Gehör wird nicht einfach „abgeschaltet“, sondern das Richtungshören bleibt erhalten und erhöht die Sicherheit im Lärm.

Hören im Lärm

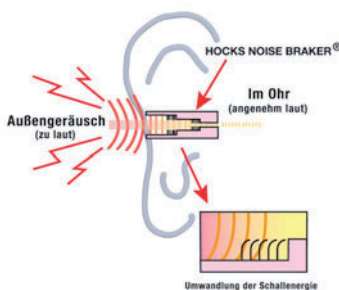

Musiker und Konzertbesucher

schätzen besonders das gute und natürliche Klangspektrum als beste Alternative zum maßgefertigten Gehörschutz.

Sportschützen und Jäger

schätzen das gute Hörvermögen in ruhiger Umgebung und die komfortable Impulsschalldämmung beim Schuss.


In der Arbeitswelt mit Dauerlärmpegeln von nahe 85 dB(A) wird Gehörschutz vielfach abgelehnt, weil das Hörvermögen durch die bekannten Gehörschutzstöpsel (oft auch maßgefertigte Gehörschutzotoplastiken) zu sehr eingeschränkt ist. Es wird vergessen, dass auch kurzzeitig auftretender Impulsschall, z. B. von Hammerschlägen, das Gehör dauerhaft schädigen kann. Mit intelligenter Lärmdämmung schließen die neuen Sonic Defenders® von EARpro auch diese Versorgungslücke.

Eine höhere Dämmwirkung in ruhigerer Umgebung, wie z. B. im Flugzeug oder im Büro, wie auch bei hohem Dauerlärm wird erreicht, indem der angebrachte Akustik-Stopper in das Akustikfilter eingesetzt wird.

Für höchsten Tragekomfort sind die Sonic Defenders® aus weichem, antiallergischem Material gefertigt, der patentierte Stützbogen passt sich der Ohrmuschel komfortabel an. Für eine optimale Passform kann die Position des Stützbogens entsprechend ausgerichtet werden. Eine Farbmarkierung für rechts (ROT) und links (WEISS) erleichtert das richtige Einsetzen. Die Sonic Defenders® sind leicht zu pflegen und mit lauwarmem Wasser abwaschbar.

Achten Sie auf einen perfekten Sitz der Stöpsel im Gehörgang!

Tipp: Die Größe „Medium“ passt in den meisten Fällen. Die Größe bezieht sich auf die Helix.

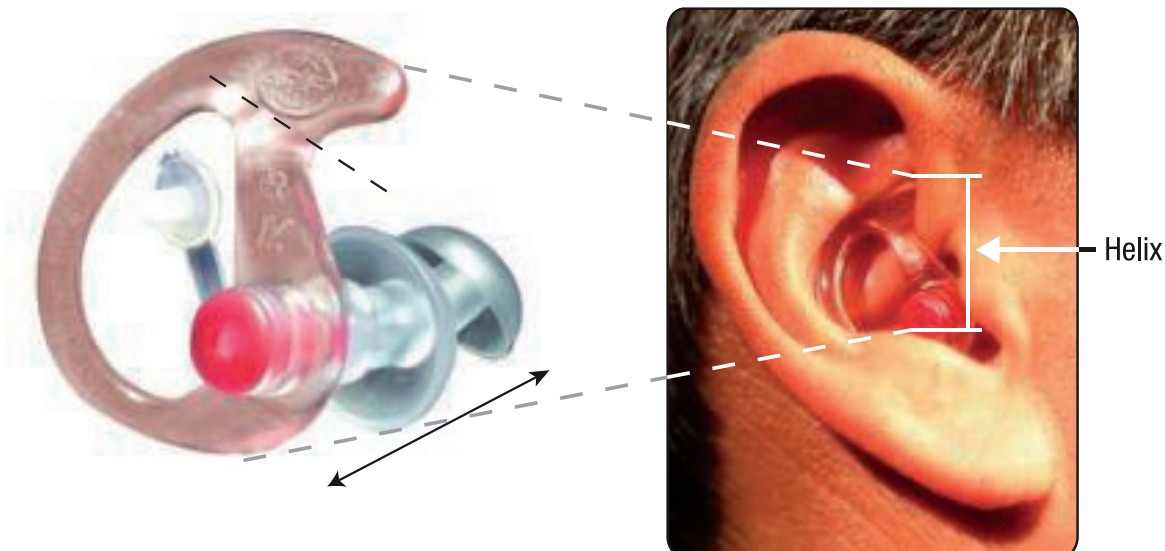

Das Ohrstück ist aus weichem, medizinischem Polymer und antiallergisch. Messen Sie die Größe der Helix wie abgebildet und bestimmen Sie die Größe des EARPRO Ohrstücks, das am besten in die Ohrmuschel passt.

- SMALL = 7/8 INCH = 2,22 cm
- MEDIUM = 1 INCH = 2,54 cm
- LARGE = 1 1/8 INCH = 2,86 cm

Für den bestmöglichen Tragekomfort justieren Sie das Ohrstück genau auf die Helix-Position, auch die Achslänge kann nach außen (entsprechend der Abbildung oben) individuell angepasst werden.

Patenterte und zum Patent angemeldete Ohrstücke.